

# اندیکاتور شیمیایی PCD بخار

## کد محصول : STL-104



برای یک سیکل کامل استریلیزاسیون، میزان فشار، وکیوم و کیفیت بخار عوامل تعیین کننده ای هستند. در سیکل هایی که نیاز است ابزارها لومن دار یا سایر لوله ها را استریل کنیم باید از نفوذ پذیری بخار در سیکل عادی اتوکلاو اطمینان حاصل کنیم. PCD ها برای شبیه سازی وضعیت استریل لومن ها طراحی شده اند. دستگاه PCD از یک لوله یک و نیم متری به قطر ۳ میلی متر و درپوش وکیوم تشکیل شده است. اندیکاتور بایستی ضمن تا کردن از وسط در داخل درپوش قرار گرفته و درپوش به لوله بسته شود. و به همراه سایر ابزارها در سیکل استریل استفاده شود.

نکته مهم: برای اطمینان از عدم نشی و اشهرای دستگاه PCD میتوان آن را داخل ظرف آب توسط سرنگ ۵ میلی لیتری تست کرد. در صورت نشی، حباب های هوا از دستگاه خارج خواهد شد. این اندیکاتور پشت چسبدار بوده و به راحتی در دفاتر مستندسازی قابل استفاده است.

### ویژگی ها:

- بدون هیچ گونه سرب و دیگر فلزات سنگین
- نوار یکبار مصرف
- قابل استفاده با هولدر تفلون بادوام
- قابلیت مستند سازی
- مقرون به صرفه
- مطابق با استاندارد EN ISO 11140
- تاریخ تولید و انقضاء روی هر اندیکاتور

### تغییر رنگ:

تغییر رنگ از زرد به سیاه

### تاریخ انقضا:

۴۸ ماه بعد از تولید

ایران کد: 2132620986220001

GTIN: 08719992310401

IRC: 3113218796643957



IU014-VER.1  
STLT-104

### شرایط نگهداری:

- در دمای اتاق (۱۰-۳۸ درجه سانتی گراد) و رطوبت ۱۰-۷۰٪ و دور از عوامل اکسیدکننده، ضد عفونی کننده و سایر مایعات نگهداری شود.
- دور از نور خورشید نگهداری شود.
- پس از استریل نگهداری آن شرایط ویژه ای ندارد.

### خصوصیات عملکرد:

قبل از استریلیزاسیون



خطا پمپ خلاء



خطا بخار و دما



صحیح

